

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: ANÁLOGO DO IMPLANTE E DO INTERMEDIÁRIO	ANÁLOGO	Data:	08/2024
			Rev:	00
			Pág:	1 de 4

Este componente protético Oralfix destina-se a um procedimento especializado, o qual deve ser executado por profissionais habilitados em próteses, implantodontia e técnico em prótese dental. Para melhores resultados utilize o produto com o conhecimento das técnicas adequadas e execute-as sempre em condições apropriadas, incluindo em ambiente cirúrgico adequado.

DESCRIÇÃO

Os componentes Análogo da Oralfix são confeccionados em Aço Inoxidável ASTM F899-303, é um componente protético de uso laboratorial, individual não estéril. Apresenta geometria e frisos que favorecem a retenção para o travamento no modelo de estudo replicando a interface protética do implante ou intermediário para confecção da prótese.

Código	Interface Protética (Família)
AE33/35	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 3,3 / 3,5
AE34	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 3,4
AE36	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 3,6
AE41	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 4,1
AE43	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 4,3
AE45	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 4,5
AE50	ANÁLOGO DO IMPLANTE HE 5,0
AI375/40	ANÁLOGO DO IMPLANTE HI 3,75 / 4,0
AI38	ANÁLOGO DO IMPLANTE HI 3,8
AI43	ANÁLOGO DO IMPLANTE HI 4,3
AI45	ANÁLOGO DO IMPLANTE HI 4,5
AI50	ANÁLOGO DO IMPLANTE HI 5,0
AI55	ANÁLOGO DO IMPLANTE HI 5,5
ACM	ANÁLOGO DO IMPLANTE CM
ACM50	ANÁLOGO DO IMPLANTE CM 5,0
AGM	ANÁLOGO DO IMPLANTE GM
AARM	ANÁLOGO ANTI-ROTACIONAL DO MINI ABUTMENT ME - HE / HI / CM / GM
AARM	ANÁLOGO ROTACIONAL MINI ABUTMENT ME - HE / HI / CM / GM
AARE	ANÁLOGO ANTI-ROTACIONAL DO ABUTMENT CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
ARE	ANÁLOGO ROTACIONAL DO ABUTMENT CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
AARPC	ANÁLOGO ANTI-ROTACIONAL PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
ARPC	ANÁLOGO ROTACIONAL PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
AARMP	ANÁLOGO ANTI-ROTACIONAL DO MICRO ABUTMENT MP - HE / HI / CM / GM
ARMP	ANÁLOGO ROTACIONAL DO MICRO ABUTMENT MP - HE / HI / CM / GM
AMU3304	ANÁLOGO DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 4
AMU3306	ANÁLOGO DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 6
AMU4504PR	ANÁLOGO DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 4
AMU4506PR	ANÁLOGO DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 6

LINHA DIGITAL:

Código	Interface Protética (Família)
DIAE33/35	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 3,3 / 3,5
DIAE34	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 3,4
DIAE36	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 3,6
DIAE41	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 4,1
DIAE43	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 4,3

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO	ANÁLOGO	Data:	08/2024
	PRODUTO: ANÁLOGO DO IMPLANTE E DO INTERMEDIÁRIO		Rev:	00
			Pág:	2 de 4

DIAE45	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 4,5
DIAE50	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HE 5,0
DIAI375/40	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HI 3,75 / 4,0
DIAI38	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HI 3,8
DIAI43	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HI 4,3
DIAI45	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HI 4,5
DIAI50	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HI 5,0
DIAI55	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE HI 5,5
DICM	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE CM
DICM50	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE CM 5,0
DIGM	ANÁLOGO DIGITAL DO IMPLANTE GM
DIAARM	ANÁLOGO DIGITAL ANTI-ROTACIONAL DO MINI ABUTMENT ME - HE / HI / CM / GM
DIAARM	ANÁLOGO DIGITAL ROTACIONAL MINI ABUTMENT ME - HE / HI / CM / GM
DIAARE	ANÁLOGO DIGITAL ANTI-ROTACIONAL DO ABUTMENT CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM (EE)
DIARE	ANÁLOGO DIGITAL ROTACIONAL DO ABUTMENT CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
DIAARPC	ANÁLOGO DIGITAL ANTI-ROTACIONAL PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
DIARPC	ANÁLOGO DIGITAL ROTACIONAL PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
DIAARMP	ANÁLOGO DIGITAL ANTI-ROTACIONAL DO MICRO ABUTMENT MP - HE / HI / CM /
DIARMP	ANÁLOGO DIGITAL ROTACIONAL DO MICRO ABUTMENT MP - HE / HI / CM / GM
DIAMU3304	ANÁLOGO DIGITAL DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 4
DIAMU3306	ANÁLOGO DIGITAL DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 6
DIAMU4504P	ANÁLOGO DIGITAL DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 4
DIAMU4506P	ANÁLOGO DIGITAL DO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 6

INDICAÇÃO DE USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

O Análogo é indicado para uso na fase laboratorial sendo incluso no modelo de gesso E o Análogo Digital incluso no modelo impresso com cliq, reproduzindo as dimensões e posicionamento do implante ou intermediário e em seguida fazer a simulação da prótese unitária ou multiplas provisória ou definitiva.

CONTRAINDICAÇÃO

Contraindica-se qualquer tipo de desgaste deste produto.

Não apresentam outras contraindicações desde que suas finalidades e indicações sejam seguidas corretamente.

MANUSEIO

Molde em Gesso: Após a moldagem com transfer correspondente conforme técnicas adequadas realizada pelo profissional de odontologia, parafusar o análogo correspondente ao transfer. O técnico de laboratório de prótese dental (TPD) que com técnicas adequadas irá fazer o envase do gesso com o análogo e de acordo com componente selecionado fará a finalização da prótese. Para aperto do parafuso do transfer, utilize Chave Digital Sextavada ou Quadrada com aperto manual.

Molde Impresso: Após feito realizado a moldagem com o transfer de scaneamento correspondente conforme técnicas adequadas realizadas pelo profissional de odontologia, enviar o arquivo para o laboratório que vai utilizar a biblioteca digital CAD / CAM e de acordo com o equipamento que dispõem faz a impressão do modelo de estudo. Selecionar a chave digital de acordo com a rosca interna do análogo e fixar no modelo impresso até ouvir o cliq indicando que está completamente fixado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

São acondicionados em embalagem saco laminado PET+PET METAL+PE/ PET+PE , com a identificação realizada diretamente na embalagem sendo impresso descrição do produto, código, lote, validade, matéria-prima nome e endereço da empresa, RT sendo indelével e de fácil leitura.. São vendidos unitariamente, não

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO	ANÁLOGO	Data:	08/2024
	PRODUTO: ANÁLOGO DO IMPLANTE E DO INTERMEDIÁRIO		Rev:	00
			Pág:	3 de 4

estéreis e são de uso único.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

- Certifique-se de que o Análogo seja compatível com o transfer ou scan body selecionado.
- Após a confecção da prótese, avalie sua adaptação sobre o Análogo.
- Este produto é de uso único.
- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
- Antes de cada procedimento, certifique-se do perfeito encaixe entre as peças.
- Não utilize o produto com validade expirada.
- Antes de cada procedimento verifique as condições dos instrumentais e/ou componentes da Oralfix, respeitando sempre sua vida útil. Substitua os instrumentais e/ou componentes em caso de dano, marcações apagadas, afiação comprometida, deformações e/ou desgaste.
- É de responsabilidade do dentista utilizar os produtos Oralfix em conformidade com as instruções de uso.
- O planejamento incorreto pode comprometer o desempenho do componente e/ou do conjunto implante/prótese resultando em falhas do sistema, como perda ou fratura do Implante, afrouxamento ou fratura dos Parafusos Protéticos ou podendo afetar a finalidade do uso do componente.

EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos desde que o produto sendo utilizado conforme as suas instruções de uso e dentro da finalidade a que se destina o componente. É necessário respeitar a compatibilidade do componente de acordo com as características do implante ou intermediário.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS E MANUTENÇÃO

Oriente o paciente quanto à necessidade de realizar um acompanhamento profissional após a cirurgia e obedecer às orientações sobre cuidados, higiene e prescrição de medicamentos. Estas orientações são de responsabilidade do profissional.

ARMAZENAMENTO

Deverão ser armazenados em local limpo e seco, longe da ação do sol (efeito da radiação solar), com temperatura inferior a 40°C.

DESCARTE DE MATERIAIS

Materiais após a utilização podem colocar em risco a saúde e o meio ambiente. Acondicionar e segurar em local adequado para fins de destinação final correta. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação da saúde e ambiental vigente.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado: Indicado no rótulo

Fabricado e comercializado por:

FERREIRA INDUSTRIA ODONTOLOGICA LTDA.

Av. Angelina Ricci Vezozzo, nº 1245 – Indústria Leves, Londrina/PR – CEP: 86087-340.

CNPJ: 84.915.149/0001-90 – AFE nº 8.01.019-1.

Responsável Técnico: Keila Ferreira – CRA-PR: 20-25774.

www.oralfix.com.br - FONE: (43) 3321-1190 - Indústria Brasileira.

Registro ANVISA: Produto Isento de Registro. Não Controlado pela Anvisa (Uso Laboratorial).

SÍMBOLOS

A tabela descreve os símbolos que podem estar impressos na rotulagem do produto. Por favor, confira na rotulagem física quais os símbolos aplicáveis ao produto.

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO	ANÁLOGO	Data:	08/2024
	PRODUTO: ANÁLOGO DO IMPLANTE E DO INTERMEDIÁRIO		Rev:	00
			Pág:	4 de 4

	Prazo de validade		Manter afastado da luz solar		Código do lote		Número de referência
	Tamanho do produto		Consultar as instruções - Para utilização		Manter seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Produto de uso único		Data de fabricação		Fabricante		Temperatura máxima 40°C
	Produto não estéril						