

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	Data:	04/2022
			Rev:	00
			Pág:	1 de 5

Este componente protético da Oralfix destina-se a um procedimento especializado e uso em laboratório de prótese, o qual deve ser executado por profissionais habilitados em próteses, implantodontia e técnico em prótese dental. Para melhores resultados, utilize o produto com o conhecimento das técnicas adequadas e execute-as sempre em condições apropriadas, incluindo em ambiente cirúrgico adequado.

DESCRIÇÃO

Os componentes Uclas e Cilindros Calcináveis da Oralfix são confeccionados em Poliacetal (POM) e acompanha parafuso em Titânio conforme norma ASTM F136 é um componente protético de uso laboratorial, individual não estéril. Apresenta geometria e frisos que favorecem a retenção após a para a aplicação da resina acrílica ou cerâmica.

Código	Interface Protética (Família)
UEAR33/35	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 3,3 /3,5 C/ PARF. SEXT.
UER33/35H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 3,3 /3,5 C/ PARF. SEXT.
UEAR34H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 3,4 C/ PARF. SEXT.
UER34H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 3,4 C/ PARF. SEXT.
UEAR36H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 3,6 C/ PARF. SEXT.
UER36H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 3,6 C/ PARF. SEXT.
UEAR41H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 4,1 C/ PARF. SEXT.
UER41H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 4,1 C/ PARF. SEXT.
UEAR43H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 4,3 C/ PARF. SEXT.
UER43H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 4,3 C/ PARF. SEXT.
UEAR45H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 4,5 C/ PARF. SEXT.
UER45H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 4,5 C/ PARF. SEXT.
UEAR50H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 5,0 C/ PARF. SEXT.
UER50H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 5,0 C/ PARF. SEXT.
UEAR33/35	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 3,3 /3,5 C/ PARF. QUADR.
UER33/35Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 3,3 /3,5 C/ PARF. QUADR.
UEAR34Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 3,4 C/ PARF. QUADR.
UER34Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 3,4 C/ PARF. QUADR.
UEAR36Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 3,6 C/ PARF. QUADR.
UER36Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 3,6 C/ PARF. QUADR.
UEAR41Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 4,1 C/ PARF. QUADR.
UER41Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 4,1 C/ PARF. QUADR.
UEAR43Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 4,3 C/ PARF. QUADR.
UER43Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 4,3 C/ PARF. QUADR.
UEAR45Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 4,5 C/ PARF. QUADR.
UER45Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 4,5 C/ PARF. QUADR.
UEAR50Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HE 5,0 C/ PARF. QUADR.
UER50Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HE 5,0 C/ PARF. QUADR.
UIAR375/40	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 C/ PARF. SEXT.
UIR375/40H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 C/ PARF. SEXT.
UIAR38H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 3,8 C/ PARF. SEXT.
UIR38H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 3,8 C/ PARF. SEXT.
UIAR43H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 4,3 C/ PARF. SEXT.
UIR43H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 4,3 C/ PARF. SEXT.
UIAR45H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 4,5 C/ PARF. SEXT.
UIR45H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 4,5 C/ PARF. SEXT.
UIAR50H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 5,0 C/ PARF. SEXT.
UIR50H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 5,0 C/ PARF. SEXT.

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	Data:	04/2022
			Rev:	00
			Pág:	2 de 5

UIAR55H	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 5,5 C/ PARF. SEXT.
UIR55H	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 5,5 C/ PARF. SEXT.
UIAR375/40	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 C/ PARF. QUADR.
UIR375/40Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 C/ PARF. QUADR.
UIAR38Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 3,8 C/ PARF. QUADR.
UIR38Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 3,8 C/ PARF. QUADR.
UIAR43Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 4,3 C/ PARF. QUADR.
UIR43Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 4,3 C/ PARF. QUADR.
UIAR45Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 4,5 C/ PARF. QUADR.
UIR45Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 4,5 C/ PARF. QUADR.
UIAR50Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 5,0 C/ PARF. QUADR.
UIR50Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 5,0 C/ PARF. QUADR.
UIAR55Q	UCLA CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL HI 5,5 C/ PARF. QUADR.
UIR55Q	UCLA CALCINÁVEL ROTACIONAL HI 5,5 C/ PARF. QUADR.
CARMN	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO N SEXTAVADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CARMNQ	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO N QUADRADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CARM2	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO 2 SEXTAVADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM (ME)
CARM2Q	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO 2 QUADRADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM (ME)
CARM3	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO 3 SEXTAVADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CARM3Q	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO 3 QUADRADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CRMN	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO N SEXTAVADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CRMNQ	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO N QUADRADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CRM2	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO 2 SEXTAVADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CRM2Q	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO 2 QUADRADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CRM3	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO 3 SEXTAVADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CRM3Q	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO 3 QUADRADO DO MINI ABUTMENT HE / HI / CM / GM, (ME)
CARE	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO SEXTAVADO DO ABUTMENT CÔNICO HE / HI / CM / GM, (EE)
CAREQ	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO QUADRADO DO ABUTMENT CÔNICO HE / HI / CM / GM, (EE)

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	Data:	04/2022
			Rev:	00
			Pág:	3 de 5

CRE	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO SEXTAVADO DO ABUTMENT CÔNICO HE / HI / CM / GM,(EE)
CREQ	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO QUADRADO DO ABUTMENT CÔNICO HE / HI / CM / GM,(EE)
CARPC	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO SEXTAVADO DO PILAR ABUTMENT HE, HI, CM, GM , (PC)
CARPCQ	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO QUADRADO DO PILAR ABUTMENT HE, HI, CM, GM , (PC)
CRPC	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO SEXTAVADO DO PILAR ABUTMENT CM / HE, HI, CM, GM , (PC)
CRPCQ	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO QUADRADO DO PILAR ABUTMENT CM / HE, HI, CM, GM , (PC)
CARMP	CILINDRO CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL C/ PARAFUSO DO MICRO ABUTMENT HE, HI, CM, GM , (MP)
CRMP	CILINDRO CALCINÁVEL ROTACIONAL C/ PARAFUSO DO MICRO ABUTMENT HE, HI, CM, GM , (MP)
CMU3304P	CILINDRO PROVISÓRIO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 4
CMU3306P	CILINDRO PROVISÓRIO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 6
CMU3304D	CILINDRO DEFINITIVO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 4
CMU3306D	CILINDRO DEFINITIVO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 3,3 X 6
CMU4504P	CILINDRO PROVISÓRIO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 4
CMU4506P	CILINDRO PROVISÓRIO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 6
CMU4504D	CILINDRO DEFINITIVO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 4
CMU4506D	CILINDRO DEFINITIVO ABUTMENT CIMENTÁVEL MU 4,5 X 6

INDICAÇÃO DE USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

A UCLA e Cilindro Calcinável da Oralfix é indicado para uso na fase laboratorial no encerramento anterior a fundição, obtendo assim uma infraestrutura dos elementos para confecção da prótese sobre implante ou intermediário unitária ou multiplas definitiva.

CONTRAINDICAÇÃO

Contraindica-se qualquer tipo de desgaste deste produto.

Não apresentam outras contraindicações desde que suas finalidades e indicações sejam seguidas corretamente.

MANUSEIO

Após a obtenção do modelo de gesso o técnico de laboratório de prótese dental (TPD) e conforme técnicas adequadas, irá parafusar a ucla ou cilindro no Análogo e remodelará o mesmo para em seguida levar ao processo de fundição em metal, aplicará cerâmica ou resina sobre o metal fundido. A forma original deve estar preservada, sem a presença de bolhas positivas de metal. Durante os procedimentos de acabamento e polimento, a interface protética do componente deve estar isolada pelo respectivo Protetor de Polimento passando para a etapa de finalização da prótese. Para aperto do parafuso, utilize Chave Digital Sextavada ou Quadrada com aperto manual.

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	Data:	04/2022
			Rev:	00
			Pág:	4 de 5

FORMA DE APRESENTAÇÃO

São acondicionados em embalagem saco laminado PET+PET METAL+PE/ PET+PE e identificação é realizada diretamente na embalagem sendo impresso descrição do produto, código, lote, validade, matéria-prima nome e endereço da empresa, RT sendo indelével e de fácil leitura.. São vendidos unitariamente, não estéreis e são de uso único.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

- Certifique-se de que o Análogo seja compatível com a Ucla ou Cilindro selecionado.
- Após a confecção da prótese, avalie sua adaptação sobre o Análogo.
- Este produto é de uso único.
- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
- Antes de cada procedimento, certifique-se do perfeito encaixe entre as peças.
- Não utilize o produto com validade expirada.
- Antes de cada procedimento verifique as condições dos instrumentais e/ou componentes da Oralfix, respeitando sempre sua vida útil. Substitua os instrumentais e/ou componentes em caso de dano, marcações apagadas, afiação comprometida, deformações e/ou desgaste.
- É de responsabilidade do dentista utilizar os produtos Oralfix em conformidade com as instruções de uso.
- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
- O planejamento incorreto pode comprometer o desempenho do componente e/ou do conjunto implante/prótese resultando em falhas do sistema, como perda ou fratura do Implante, afrouxamento ou fratura dos Parafusos Protéticos ou podendo afetar a finalidade do uso do componente.
- Recomenda-se que a prótese seja higienizada antes da instalação em boca.
- Antes da instalação do produto, certifique-se de que o mesmo possui a mesma interface protética do implante/componente protético e do perfeito encaixe entre as peças. Durante a escolha do componente, certifique-se da indicação de uso de componentes selecionado, sendo componentes rotacionais indicados para próteses múltiplas e antirrotacionais para próteses unitárias. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.
- Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos desde que o produto sendo utilizado conforme as suas instruções de uso e dentro da finalidade a que se destina o componente. . É necessário respeitar os diâmetros e as indicações de tolerância dos componentes, conforme compatibilidade.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS E MANUTENÇÃO

Orientar o paciente quanto à necessidade de realizar um acompanhamento profissional após a cirurgia e obedecer às orientações sobre cuidados, higiene e prescrição de medicamentos. Estas orientações são de responsabilidade do profissional.

ARMAZENAMENTO

Deverão ser armazenados em local limpo e seco, longe da ação do sol (efeito da radiação solar), com temperatura inferior a 40°C.

DESCARTE DE MATERIAIS

Materiais após a utilização podem colocar em risco a saúde e o meio ambiente. Acondicionar e segurar em local adequado para fins de destinação final correta. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação da saúde e ambiental vigente.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado: Indicado no rótulo.

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	UCLA E CILINDRO CALCINÁVEL	Data:	04/2022
			Rev:	00
			Pág:	5 de 5

SÍMBOLOS

A tabela descreve os símbolos que podem estar impressos na rotulagem do produto. Por favor, confira na rotulagem física quais os símbolos aplicáveis ao produto.

	Prazo de validade		Manter afastado da luz solar		Código do lote		Número de referência
	Tamanho do produto		Consultar as instruções - Para utilização		Manter seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Produto de uso único		Data de fabricação		Fabricante		Temperatura máxima 40°C
	Produto não estéril						

Fabricado e comercializado por:

FERREIRA INDUSTRIA ODONTOLOGICA LTDA.

Av. Angelina RiCi Vezozzo, nº 1245 – Indústria Leves, Londrina/PR – CEP: 86087-340.

CNPJ: 84.915.149/0001-90 – AFE nº 8.01.019-1.

Responsável Técnico: Keila Ferreira – CRA-PR: 20-5774.

www.oralfix.com.br - FONE: (43) 3321-1190 - Indústria Brasileira.

Registro ANVISA: Produto Isento de Registro. Não Controlado pela Anvisa (Uso Laboratorial).