

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	1 de 18

Este componente protético Oralfix destina-se a um procedimento especializado, o qual deve ser executado por profissionais habilitados em próteses, implantodontia e técnico em prótese dental. Para melhores resultados, utilize o produto com o conhecimento das técnicas adequadas e execute-as sempre em condições apropriadas, incluindo em ambiente cirúrgico adequado.

DESCRIÇÃO

Os componentes Uclas, Cilindros de Titânio e Base Ti para Provisórios da Oralfix são confeccionados em Titânio ASTM F67 e acompanha do parafuso de Titânio ASTM F136 é um componente protético de uso laboratorial, individual não estéril. Apresenta geometria e frisos que favorecem ao enceramento e aplicação da resina acrílica.

Código	Interface Protética (Família)
UTEAR33/35H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 3,3 / 3,5 SEXT.
UTEAR34H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 3,4 SEXT.
UTEAR36H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 3,6 SEXT.
UTEAR41H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 4,1 SEXT.
UTEAR43H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 4,3 SEXT.
UTEAR45H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 4,5 SEXT.
UTEAR50H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 5,0 SEXT.
UTER33/35H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 3,3 / 3,5 SEXT.
UTER34H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 3,4 SEXT.
UTER36H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 3,6 SEXT.
UTER41H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 4,1 SEXT.
UTER43H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 4,3 SEXT.
UTER45H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 4,5 SEXT.
UTER50H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 5,0 SEXT.
UTEAR33/35Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 3,3 / 3,5 QUAD.
UTEAR34Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 3,4 QUAD.
UTEAR36Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 3,6 QUAD.
UTEAR41Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 4,1 QUAD.
UTEAR43Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 4,3 QUAD.
UTEAR45Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 4,5 QUAD.
UTEAR50Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HE 5,0 QUAD.
UTER33/35Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 3,3 / 3,5 QUAD.
UTER34Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 3,4 QUAD.
UTER36Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 3,6 QUAD.
UTER41Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 4,1 QUAD.
UTER43Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 4,3 QUAD.
UTER45Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 4,5 QUAD.
UTER50Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HE 5,0 QUAD.
UTIAR33/35H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 3,3 / 3,5 SEXT.
UTIAR375/40H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 SEXT.
UTIAR38H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 3,8 SEXT.
UTIAR43H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 4,3 SEXT.
UTIAR45H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 4,5 SEXT.

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	2 de 18

UTIR50H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 5,0 SEXT.
UTIR55H	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 5,5 SEXT.
UTIR33/35H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 3,3 / 3,5 SEXT.
UTIR375/40H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 SEXT.
UTIR38H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 3,8 SEXT.
UTIR43H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 4,3 SEXT.
UTIR45H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 4,5 SEXT.
UTIR50H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 5,0 SEXT.
UTIR55H	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 5,5 SEXT.
UTIR33/35Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 3,3 / 3,5 QUAD.
UTIR375/40Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 QUAD.
UTIR38Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 3,8 QUAD.
UTIR43Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 4,3 QUAD.
UTIR45Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 4,5 QUAD.
UTIR50Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 5,0 QUAD.
UTIR55Q	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL HI 5,5 QUAD.
UTIR33/35Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 3,3 / 3,5 QUAD.
UTIR375/40Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 3,75 / 4,0 QUAD.
UTIR38Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 3,8 QUAD.
UTIR43Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 4,3 QUAD.
UTIR45Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 4,5 QUAD.
UTIR50Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 5,0 QUAD.
UTIR55Q	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL HI 5,5 QUAD.
UTCAR3505	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 0,5 SEXT.
UTCAR3508	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 0,8 SEXT.
UTCAR3501	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 1,0 SEXT.
UTCAR3515	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 1,5 SEXT.
UTCAR3502	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 2,0 SEXT.
UTCAR3525	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 2,5 SEXT.
UTCAR3503	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 3,0 SEXT.
UTCAR3535	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 3,5 SEXT.
UTCAR3504	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 4,0 SEXT.
UTCAR3545	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 3,5 X 4,5 SEXT.
UTCAR4505	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 0,5 SEXT.
UTCAR4508	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 0,8 SEXT.
UTCAR4501	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 1,0 SEXT.
UTCAR4515	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 1,5 SEXT.
UTCAR4502	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 2,0 SEXT.
UTCAR4525	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 2,5 SEXT.
UTCAR4503	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 3,0 SEXT.
UTCAR4535	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 3,5 SEXT.

	Título		Identificação		Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI		TITÂNIO PARA PROVISÓRIO		Data:	12/2024
					Rev:	01
					Pág:	3 de 18

UTCMA4504	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 4,0 SEXT.
UTCMA4545	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL CM 4,5 X 4,5 SEXT.
UTCMR3505	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 0,5 SEXT.
UTCMR3508	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 0,8 SEXT.
UTCMR3501	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 1,0 SEXT.
UTCMR3515	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 1,5 SEXT.
UTCMR3502	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 2,0 SEXT.
UTCMR3525	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 2,5 SEXT.
UTCMR3503	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 3,0 SEXT.
UTCMR3535	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 3,5 SEXT.
UTCMR3504	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 4,0 SEXT.
UTCMR3545	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 3,5 X 4,5 SEXT.
UTCMR4505	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 0,5 SEXT.
UTCMR4508	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 0,8 SEXT.
UTCMR4501	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 1,0 SEXT.
UTCMR4515	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 1,5 SEXT.
UTCMR4502	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 2,0 SEXT.
UTCMR4525	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 2,5 SEXT.
UTCMR4503	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 3,0 SEXT.
UTCMR4535	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 3,5 SEXT.
UTCMR4504	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 4,0 SEXT.
UTCMR4545	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL CM 4,5 X 4,5 SEXT.
UTGMAR3505	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 3,5 X 0,5 SEXT.
UTGMAR3508	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 3,5 X 0,8 SEXT.
UTGMAR3515	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 3,5 X 1,5 SEXT.
UTGMAR3525	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 3,5 X 2,5 SEXT.
UTGMAR3535	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 3,5 X 3,5 SEXT.
UTGMAR3545	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 3,5 X 4,5 SEXT.
UTGMAR4505	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 4,5 X 0,5 SEXT.
UTGMAR4508	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 4,5 X 0,8 SEXT.
UTGMAR4515	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 4,5 X 1,5 SEXT.
UTGMAR4525	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 4,5 X 2,5 SEXT.
UTGMAR4535	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 4,5 X 3,5 SEXT.
UTGMAR4545	UCLA TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL GM 4,5 X 4,5 SEXT.
UTGMR3505	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 3,5 X 0,5 SEXT.
UTGMR3508	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 3,5 X 0,8 SEXT.
UTGMR3515	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 3,5 X 1,5 SEXT.

	Título		Identificação		Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI		TITÂNIO PARA PROVISÓRIO		Data:	12/2024
					Rev:	01
					Pág:	4 de 18

UTGMR3525	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 3,5 X 2,5 SEXT.
UTGMR3535	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 3,5 X 3,5 SEXT.
UTGMR3545	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 3,5 X 4,5 SEXT.
UTGMR4505	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 4,5 X 0,5 SEXT.
UTGMR45008	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 4,5 X 0,8 SEXT.
UTGMR4515	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 4,5 X 1,5 SEXT.
UTGMR4525	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 4,5 X 2,5 SEXT.
UTGMR4535	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 4,5 X 3,5 SEXT.
UTGMR4545	UCLA TITÂNIO ROTACIONAL GM 4,5 X 4,5 SEXT.
CTARMN	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL N DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTARMNQ	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL N QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM
CTARM2	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL 2 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTARM2Q	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL 2 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM
CTARM3	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL 3 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTARM3Q	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL 3 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM
CTRMN	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL N DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTRMNQ	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL N QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTRM2	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL 2 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTRM2Q	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL 2 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTRM3	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL 3 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTRM3Q	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL 3 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
CTARE	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
CTAREQ	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL QUAD. DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI /
CTRE	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
CTREQ	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL QUAD. DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM /
CTARPC	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM /
CTARPCQ	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL QUAD. DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI
CTRPC	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
CTRPCQ	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL QUAD. DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM
CTARMP	CILINDRO TITÂNIO ANTI-ROTACIONAL DO MICRO PILAR MP - HE / HI / CM / GM
CTRMP	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL DO MICRO PILAR MP - HE / HI / CM / GM
TBE33/350401S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE33/350402S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE33/350403S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE33/350404S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE33/350405S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 5,0 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	5 de 18

TBE33/350406S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE33/350601S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE33/350602S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE33/350603S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE33/350604S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE33/350605S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE33/350606S	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE33/350401L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE33/350402L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE33/350403L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE33/350404L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE33/350405L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE33/350406L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE33/350601L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE33/350602L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBE33/350603L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE33/350604L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE33/350605L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE33/350606L	BASE TI HE 3,3/3,5 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE340401S	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE340402S	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE340403S	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE340404S	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE340405S	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE340406S	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE340601S	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE340602S	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE340603S	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE340604S	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE340605S	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE340606S	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE340401L	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE340402L	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE340403L	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE340404L	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE340405L	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE340406L	BASE TI HE 3,4 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE340601L	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE340602L	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 2,0 LARGE

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	6 de 18

TBE340603L	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE340604L	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE340605L	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE340606L	BASE TI HE 3,4 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE360401S	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE360402S	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE360403S	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE360404S	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE360405S	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE360406S	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE360601S	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE360602S	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE360603S	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE360604S	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE360605S	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE360606S	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE360401L	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE360402L	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE360403L	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE360404L	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE360405L	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE360406L	BASE TI HE 3,6 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE360601L	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE360602L	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBE360603L	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE360604L	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE360605L	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE360606L	BASE TI HE 3,6 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE375400401S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE375400402S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE375400403S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE375400404S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE375400405S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE375400406S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE375400601S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE375400602S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE375400603S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE375400604S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE375400605S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE375400606S	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 6,0 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	7 de 18

TBE375400401L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE375400402L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE375400403L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE375400404L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE375400405L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE375400406L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE375400601L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE375400602L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBE375400603L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE375400604L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE375400605L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE375400606L	BASE TI HE 3,75/4,0 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE410401S	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE410402S	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE410403S	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE410404S	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE410405S	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE410406S	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE410601S	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE410602S	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE410603S	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE410604S	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE410605S	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE410606S	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE410401L	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE410402L	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE410403L	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE410404L	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE410405L	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE410406L	BASE TI HE 4,1 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE410601L	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE410602L	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBE410603L	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE410604L	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE410605L	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE410606L	BASE TI HE 4,1 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE430401S	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE430402S	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE430403S	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 3,0 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	8 de 18

TBE430404S	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE430405S	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE430406S	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE430601S	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE430602S	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE430603S	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE430604S	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE430605S	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE430606S	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE430401L	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE430402L	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE430403L	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE430404L	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE43005L	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE430406L	BASE TI HE 4,3 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE430601L	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE430602L	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBE430603L	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE430604L	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE430605L	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE430606L	BASE TI HE 4,3 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE450401S	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE450402S	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE450403S	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE450404S	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE450405S	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE450406S	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE450601S	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE450602S	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE450603S	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE450604S	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE450605S	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE450606S	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE450401L	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE450402L	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE450403L	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE450404L	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE450405L	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE450406L	BASE TI HE 4,5 X 4,0 X 6,0 LARGE

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	9 de 18

TBE450601L	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBE450602L	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBE450603L	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBE450604L	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBE450605L	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBE450606L	BASE TI HE 4,5 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBE500401S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE500402S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE500403S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBI500404S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE500405S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE500406S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBE500601S	BASE TI HE 5,0 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBE500602S	BASE TI HE 5,0 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBE500603S	BASE TI HE 5,0 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBE500604S	BASE TI HE 5,0 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBE500605S	BASE TI HE 5,0 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBE500606S	BASE TI HE 5,0 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBE500401L	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBE500402L	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBE500403L	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBE500404L	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBE500405L	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBE500406L	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBE500401S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBE500402S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBE500403S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBE500404S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBE500405S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBE500406S	BASE TI HE 5,0 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBI380401S	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBI380402S	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBI380403S	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBI380404S	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBI380405S	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBI380406S	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBI380601S	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBI380602S	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBI380603S	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBI380604S	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 4,0 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	10 de 18

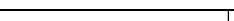
TBI380605S	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBI380606S	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBI380401L	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBI380402L	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBI380403L	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBI380404L	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBI380405L	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBI380406L	BASE TI HI 3,8 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBI380601L	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBI380602L	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBI380603L	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBI380604L	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBI380605L	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBI380606L	BASE TI HI 3,8 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBI500401S	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 1,0 SMALL
TBI500402S	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 2,0 SMALL
TBI500403S	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 3,0 SMALL
TBI500404S	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 4,0 SMALL
TBI500405S	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 5,0 SMALL
TBI500406S	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 6,0 SMALL
TBI500601S	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 1,0 SMALL
TBI500602S	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 2,0 SMALL
TBI500603S	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 3,0 SMALL
TBI500604S	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 4,0 SMALL
TBI500605S	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 5,0 SMALL
TBI500606S	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 6,0 SMALL
TBI500401L	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 1,0 LARGE
TBI500402L	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 2,0 LARGE
TBI500403L	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 3,0 LARGE
TBI500404L	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 4,0 LARGE
TBI500405L	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 5,0 LARGE
TBI500406L	BASE TI HI 5,0 X 4,0 X 6,0 LARGE
TBI500601L	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 1,0 LARGE
TBI500602L	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 2,0 LARGE
TBI500603L	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 3,0 LARGE
TBI500604L	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 4,0 LARGE
TBI500605L	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 5,0 LARGE
TBI500606L	BASE TI HI 5,0 X 6,0 X 6,0 LARGE
TBCMN0405S	BASE TI CM N 4,0 X 0,5 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	11 de 18

TBCMN0408S	BASE TI CM N 4,0 X 0,8 SMALL
TBCMN0415S	BASE TI CM N 4,0 X 1,5 SMALL
TBCMN0425S	BASE TI CM N 4,0 X 2,5 SMALL
TBCMN0435S	BASE TI CM N 4,0 X 3,5 SMALL
TBCMN0445S	BASE TI CM N 4,0 X 4,5 SMALL
TBCMN0455S	BASE TI CM N 4,0 X 5,5 SMALL
TBCMN0605S	BASE TI CM N 6,0 X 0,5 SMALL
TBCMN0608S	BASE TI CM N 6,0 X 0,8 SMALL
TBCMN0615S	BASE TI CM N 6,0 X 1,5 SMALL
TBCMN0625S	BASE TI CM N 6,0 X 2,5 SMALL
TBCMN0635S	BASE TI CM N 6,0 X 3,5 SMALL
TBCMN0645S	BASE TI CM N 6,0 X 4,5 SMALL
TBCMN0655S	BASE TI CM N 6,0 X 5,5 SMALL
TBCMN0405L	BASE TI CM N 4,0 X 0,5 LARGE
TBCMN0408L	BASE TI CM N 4,0 X 0,8 LARGE
TBCMN0415L	BASE TI CM N 4,0 X 1,5 LARGE
TBCMN0425L	BASE TI CM N 4,0 X 2,5 LARGE
TBCMN0435L	BASE TI CM N 4,0 X 3,5 LARGE
TBCMN0445L	BASE TI CM N 4,0 X 4,5 LARGE
TBCMN0455L	BASE TI CM N 4,0 X 5,5 LARGE
TBCMN0605L	BASE TI CM N 6,0 X 0,5 LARGE
TBCMN0608L	BASE TI CM N 6,0 X 0,8 LARGE
TBCMN0615L	BASE TI CM N 6,0 X 1,5 LARGE
TBCMN0625L	BASE TI CM N 6,0 X 2,5 LARGE
TBCMN0635L	BASE TI CM N 6,0 X 3,5 LARGE
TBCMN0645L	BASE TI CM N 6,0 X 4,5 LARGE
TBCMN0655L	BASE TI CM N 6,0 X 5,5 LARGE
TBGMN0405S	BASE TI GM N 4,0 X 0,5 SMALL
TBGMN0408S	BASE TI GM N 4,0 X 0,8 SMALL
TBGMN0415S	BASE TI GM N 4,0 X 1,5 SMALL
TBGMN0425S	BASE TI GM N 4,0 X 2,5 SMALL
TBGMN0435S	BASE TI GM N 4,0 X 3,5 SMALL
TBGMN0445S	BASE TI GM N 4,0 X 4,5 SMALL
TBGMN0455S	BASE TI GM N 4,0 X 5,5 SMALL
TBGMN0605S	BASE TI GM N 6,0 X 0,5 SMALL
TBGMN0608S	BASE TI GM N 6,0 X 0,8 SMALL
TBGMN0615S	BASE TI GM N 6,0 X 1,5 SMALL
TBGMN0625S	BASE TI GM N 6,0 X 2,5 SMALL
TBGMN0635S	BASE TI GM N 6,0 X 3,5 SMALL
TBGMN0645S	BASE TI GM N 6,0 X 4,5 SMALL
TBGMN0655S	BASE TI GM N 6,0 X 5,5 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	12 de 18

TBGMN0405L	BASE TI GM N 4,0 X 0,5 LARGE
TBGMN0408L	BASE TI GM N 4,0 X 0,8 LARGE
TBGMN0415L	BASE TI GM N 4,0 X 1,5 LARGE
TBGMN0425L	BASE TI GM N 4,0 X 2,5 LARGE
TBGMN0435L	BASE TI GM N 4,0 X 3,5 LARGE
TBGMN0445L	BASE TI GM N 4,0 X 4,5 LARGE
TBGMN0455L	BASE TI GM N 4,0 X 5,5 LARGE
TBGMN0605L	BASE TI GM N 6,0 X 0,5 LARGE
TBGMN0608L	BASE TI GM N 6,0 X 0,8 LARGE
TBGMN0615L	BASE TI GM N 6,0 X 1,5 LARGE
TBGMN0625L	BASE TI GM N 6,0 X 2,5 LARGE
TBGMN0635L	BASE TI GM N 6,0 X 3,5 LARGE
TBGMN0645L	BASE TI GM N 6,0 X 4,5 LARGE
TBCMC0401S	BASE TI CM C 4,0 X 1,0 SMALL
TBCMC0402S	BASE TI CM C 4,0 X 2,0 SMALL
TBCMC0403S	BASE TI CM C 4,0 X 3,0 SMALL
TBCMC0404S	BASE TI CM C 4,0 X 4,0 SMALL
TBCMC0405S	BASE TI CM C 4,0 X 5,0 SMALL
TBCMC0406S	BASE TI CM C 4,0 X 6,0 SMALL
TBCMC0601S	BASE TI CM C 6,0 X 1,0 SMALL
TBCMC0602S	BASE TI CM C 6,0 X 2,0 SMALL
TBCMC0603S	BASE TI CM C 6,0 X 3,0 SMALL
TBCMC0604S	BASE TI CM C 6,0 X 4,0 SMALL
TBCMC0605S	BASE TI CM C 6,0 X 5,0 SMALL
TBCMC0606S	BASE TI CM C 6,0 X 6,0 SMALL
TBCMC0401L	BASE TI CM C 4,0 X 1,0 LARGE
TBCMC0402L	BASE TI CM C 4,0 X 2,0 LARGE
TBCMC0403L	BASE TI CM C 4,0 X 3,0 LARGE
TBCMC0404L	BASE TI CM C 4,0 X 4,0 LARGE
TBCMC0405L	BASE TI CM C 4,0 X 5,0 LARGE
TBCMC0406L	BASE TI CM C 4,0 X 6,0 LARGE
TBCMC0601L	BASE TI CM C 6,0 X 1,0 LARGE
TBCMC0602L	BASE TI CM C 6,0 X 2,0 LARGE
TBCMC0603L	BASE TI CM C 6,0 X 3,0 LARGE
TBCMC0604L	BASE TI CM C 6,0 X 4,0 LARGE
TBCMC0605L	BASE TI CM C 6,0 X 5,0 LARGE
TBCMC0606L	BASE TI CM C 6,0 X 6,0 LARGE
TBBTF0401S	BASE TI CM BTF 4,0 X 1,0 SMALL
TBBTF0402S	BASE TI CM BTF 4,0 X 2,0 SMALL

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	13 de 18

TBBTF0403S	BASE TI CM BTF 4,0 X 3,0 SMALL
TBBTF0404S	BASE TI CM BTF 4,0 X 4,0 SMALL
TBBTF0405S	BASE TI CM BTF 4,0 X 5,0 SMALL
TBBTF0406S	BASE TI CM BTF 4,0 X 6,0 SMALL
TBBTF0601S	BASE TI CM BTF 6,0 X 1,0 SMALL
TBBTF0602S	BASE TI CM BTF 6,0 X 2,0 SMALL
TBBTF0603S	BASE TI CM BTF 6,0 X 3,0 SMALL
TBBTF0604S	BASE TI CM BTF 6,0 X 4,0 SMALL
TBBTF0605S	BASE TI CM BTF 6,0 X 5,0 SMALL
TBBTF0606S	BASE TI CM BTF 6,0 X 6,0 SMALL
TBBTF0401L	BASE TI CM BTF 4,0 X 1,0 LARGE
TBBTF0402L	BASE TI CM BTF 4,0 X 2,0 LARGE
TBBTF0403L	BASE TI CM BTF 4,0 X 3,0 LARGE
TBBTF0404L	BASE TI CM BTF 4,0 X 4,0 LARGE
TBBTF0405L	BASE TI CM BTF 4,0 X 5,0 LARGE
TBBTF0406L	BASE TI CM BTF 4,0 X 6,0 LARGE
TBBTF0601L	BASE TI CM BTF 6,0 X 1,0 LARGE
TBBTF0602L	BASE TI CM BTF 6,0 X 2,0 LARGE
TBBTF0603L	BASE TI CM BTF 6,0 X 3,0 LARGE
TBBTF0604L	BASE TI CM BTF 6,0 X 4,0 LARGE
TBBTF0605L	BASE TI CM BTF 6,0 X 5,0 LARGE
TBBTF0606L	BASE TI CM BTF 6,0 X 6,0 LARGE
TBCMDB0405S	BASE TI CM DB 4,0 X 0,5 SMALL
TBCMDB0408S	BASE TI CM DB 4,0 X 0,8 SMALL
TBCMDB0415S	BASE TI CM DB 4,0 X 1,5 SMALL
TBCMDB0425S	BASE TI CM DB 4,0 X 2,5 SMALL
TBCMDB0435S	BASE TI CM DB 4,0 X 3,5 SMALL
TBCMDB0445S	BASE TI CM DB 4,0 X 4,5 SMALL
TBCMDB0455S	BASE TI CM DB 4,0 X 5,5 SMALL
TBCMDB0605S	BASE TI CM DB 6,0 X 0,5 SMALL
TBCMDB0608S	BASE TI CM DB 6,0 X 0,8 SMALL
TBCMDB0615S	BASE TI CM DB 6,0 X 1,5 SMALL
TBCMDB0625S	BASE TI CM DB 6,0 X 2,5 SMALL
TBCMDB0635S	BASE TI CM DB 6,0 X 3,5 SMALL
TBCMDB0645S	BASE TI CM DB 6,0 X 4,5 SMALL
TBCMDB0655S	BASE TI CM DB 6,0 X 5,5 SMALL
TBCMDB0405L	BASE TI CM DB 4,0 X 0,5 LARGE
TBCMDB0408L	BASE TI CM DB 4,0 X 0,8 LARGE
TBCMDB0415L	BASE TI CM DB 4,0 X 1,5 LARGE
TBCMDB0425L	BASE TI CM DB 4,0 X 2,5 LARGE

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	14 de 18

TBCMDB0435L	BASE TI CM DB 4,0 X 3,5 LARGE
TBCMDB0445L	BASE TI CM DB 4,0 X 4,5 LARGE
TBCMDB0455L	BASE TI CM DB 4,0 X 5,5 LARGE
TBCMDB0605L	BASE TI CM DB 6,0 X 0,5 LARGE
TBCMDB0608L	BASE TI CM DB 6,0 X 0,8 LARGE
TBCMDB0615L	BASE TI CM DB 6,0 X 1,5 LARGE
TBCMDB0625L	BASE TI CM DB 6,0 X 2,5 LARGE
TBCMDB0635L	BASE TI CM DB 6,0 X 3,5 LARGE
TBCMDB0645L	BASE TI CM DB 6,0 X 4,5 LARGE
TBCMSW0401S	BASE TI CM SW 4,0 X 1,0 SMALL
TBCMSW0402S	BASE TI CM SW 4,0 X 2,0 SMALL
TBCMSW0403S	BASE TI CM SW 4,0 X 3,0 SMALL
TBCMSW0404S	BASE TI CM SW 4,0 X 4,0 SMALL
TBCMSW0405S	BASE TI CM SW 4,0 X 5,0 SMALL
TBCMSW0406S	BASE TI CM SW 4,0 X 6,0 SMALL
TBCMSW0601S	BASE TI CM SW 6,0 X 1,0 SMALL
TBCMSW0602S	BASE TI CM SW 6,0 X 2,0 SMALL
TBCMSW0603S	BASE TI CM SW 6,0 X 3,0 SMALL
TBCMSW0604S	BASE TI CM SW 6,0 X 4,0 SMALL
TBCMSW0605S	BASE TI CM SW 6,0 X 5,0 SMALL
TBCMSW0606S	BASE TI CM SW 6,0 X 6,0 SMALL
TBCMSW0401L	BASE TI CM SW 4,0 X 1,0 LARGE
TBCMSW0402L	BASE TI CM SW 4,0 X 2,0 LARGE
TBCMSW0403L	BASE TI CM SW 4,0 X 3,0 LARGE
TBCMSW0404L	BASE TI CM SW 4,0 X 4,0 LARGE
TBCMSW0405L	BASE TI CM SW 4,0 X 5,0 LARGE
TBCMSW0406L	BASE TI CM SW 4,0 X 6,0 LARGE
TBCMSW0601L	BASE TI CM SW 6,0 X 1,0 LARGE
TBCMSW0602L	BASE TI CM SW 6,0 X 2,0 LARGE
TBCMSW0603L	BASE TI CM SW 6,0 X 3,0 LARGE
TBCMSW0604L	BASE TI CM SW 6,0 X 4,0 LARGE
TBCMSW0605L	BASE TI CM SW 6,0 X 5,0 LARGE
TBCMSW0606L	BASE TI CM SW 6,0 X 6,0 LARGE
TBCARMN	BASE TI ANTI-ROTACIONAL N DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBARMNQ	BASE TI ANTI-ROTACIONAL N QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCARM2	BASE TI ANTI-ROTACIONAL 2 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCARM2Q	BAS TI ANTI-ROTACIONAL 2 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCARM3	BAS TI ANTI-ROTACIONAL 3 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCARM3Q	BASE TI ANTI-ROTACIONAL 3 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	15 de 18

TBCRMN	BASE TI ROTACIONAL N DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCRMNQ	BASE TI ROTACIONAL N QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCRM2	BASE TI ROTACIONAL 2 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCRM2Q	BASE TI ROTACIONAL 2 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCRM3	BASE TI ROTACIONAL 3 DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCRM3Q	CILINDRO TITÂNIO ROTACIONAL 3 QUAD. DO MINI PILAR ME - HE / HI / CM / GM
TBCARE	BASE TI ANTI-ROTACIONAL DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
TBCAREQ	BASE TI ANTI-ROTACIONAL QUAD. DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
TBCRE	BASE TI ROTACIONAL DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
TBCREQ	BASE TI ROTACIONAL QUAD. DO PILAR CÔNICO EE - HE / HI / CM / GM
TBCARPC	BASE TI ANTI-ROTACIONAL DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
TBCARPCQ	BASE TI ANTI-ROTACIONAL QUAD. DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
TBCRPC	BASE TI ROTACIONAL DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
TBCRPCQ	BASE TI ROTACIONAL QUAD. DO PILAR ABUTMENT PC - HE / HI / CM / GM
TBCARMP	BASE TI ANTI-ROTACIONAL DO MICRO PILAR MP - HE / HI / CM / GM
TBCRMP	BASE TI ROTACIONAL DO MICRO PILAR MP - HE / HI / CM / GM

INDICAÇÃO DE USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

São componentes protéticos para provisórios fabricados em Titânio ASTM F136, utilizados e manipulados em laboratório de prótese dental conforme técnicas laboratoriais, nas fases de preparação para o processo de confecção da prótese provisória, destinados a curto prazo.

CONTRAINDICAÇÃO

Contraindica-se qualquer tipo de desgaste deste produto. Não apresentam outras contraindicações desde que suas finalidades e indicações sejam seguidas corretamente.

MANUSEIO

Moldagem de gesso: Após a obtenção do modelo de gesso o técnico de laboratório de prótese dental (TPD) e conforme técnicas adequadas, selecionar e instalar a UCLA Titânio e/ou Cilindro Titânio sobre o Análogo correspondente fixo no modelo de gesso, confeccionar e personalizar a prótese provisória sobre o mesmo.

Modelo impresso: Após a transferência e confecção do modelo impresso e de acordo com as técnicas adequadas, encaixar o Análogo no modelo impresso com a respectiva chave até ouvir o click e em seguida fixar a Base Ti, certificando o perfeito encaixe entre as peças. Feito o escaner e componente usinado, aplicar a resina na região da Base Ti e pressione a estrutura fresada encaixando-a de acordo com as guias indexadores disponíveis. Pressione sobre a Base de Ti e remova imediatamente o excesso de resina.

A plataforma protética anti-rotacional ou rotacional deve ser preservada, sem desgastes mantendo a forma original. Durante os procedimentos de acabamento e polimento, a interface protética do componente deve estar isolada pelo respectivo Protetor de Polimento passando para a etapa de finalização da prótese provisória. Toque máximo 10 Ncm nos modelos de prova.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

As Uclas de Titânio, Cilindro de Titânio e/ou Base Ti para provisório são acondicionados em embalagem saco laminado PET+PET METAL+PE/ PET+PE e identificação é realizada diretamente na embalagem sendo impresso descrição do produto, código, lote, validade, matéria-prima nome e endereço da empresa, RT sendo indelével e de fácil leitura. São vendidos unitariamente, não estéreis e são de uso único.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

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
A - Advertências:

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	16 de 18

- Durante a escolha do componente, certifique-se da indicação de uso dos componentes selecionado se correspondem com a finalidade a que se destina.
- Certifique-se de que a Ucla de Titânio, Cilindro de Titânio ou a Base TI para prótese provisória seja compatível com o Análogo selecionado.
- Não utilizar o componente sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar e conduzir a resultados não satisfatórios.
- Certifique-se de que os produtos para manipulação e confecção da prótese provisória em laboratório até o momento da utilização seja de boa qualidade, bem armazenado e em local limpo e seco, em temperatura e protegido da luz solar direta.
- Este produto é de uso único.
- Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada.
- É de responsabilidade do profissional utilizar os produtos Oralfix em conformidade com as instruções de uso.
- O planejamento incorreto pode comprometer o desempenho do componente resultando em falhas do sistema, como perda, fratura ou afrouxamento podendo afetar a finalidade do uso do componente.
- Antes da instalação do produto, certifique-se de que o mesmo possui a mesma interface protética do implante / componente protético e do perfeito encaixe entre as peças.
- Durante a escolha do componente, certifique-se da indicação de uso de componentes selecionado, sendo componentes rotacionais indicados para próteses múltiplas e anti-rotacionais para próteses unitárias. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá conduzir a resultados não satisfatórios.
- Antes de cada procedimento verifique as condições dos instrumentais e/ou componentes da Oralfix, respeitando sempre sua vida útil. Substitua os instrumentais e/ou componentes em caso de dano, marcações apagadas, afiação comprometida, deformações e/ou desgaste.
- Após a confecção da prótese, avalie sua adaptação sobre o Análogo.

B- Precauções de uso:

- Antes do uso da Ucla de Titânio, Cilindro de Titânio ou a Base TI, certifique-se de que o mesmo possui a mesma interface protética e características do análogo correspondente.
- Certifique-se que a estabilidade e o torque de instalação do componente está de acordo com as instruções de uso.
- Este dispositivo não deve ser personalizado. O desgaste pode ocasionar falha no desempenho.
- Torque excessivo pode tornar o sistema inoperante, o excesso ou a falta de torque pode causar resultados indesejáveis.
- A Ucla de Titânio, o Cilindro de Titânio e/ou a Base TI é de uso único e fornecido “não estéril”, proibido reprocessar.
- Não utilize o produto se sua embalagem estiver violada.
- O reuso da Ucla de Titânio, do Cilindro de Titânio ou a Base TI pode ocasionar efeitos biológicos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microrganismos e / ou substâncias decorrentes de usos anteriores e / ou do reprocessamento; alterações das características físicas, mecânicas e químicas, macro e micro estruturais, originais do produto que podem prejudicar a sua funcionalidade pretendida. O reuso não garante sua segurança e eficácia e isenta qualquer garantia dos produtos relacionados, portanto, é um produto de uso único.
- Não utilize o produto se sua validade estiver expirada.
- Antes de cada procedimento, certifique-se do perfeito encaixe entre as peças.
- Utilize apenas a Ucla de Titânio, o Cilindro de Titânio ou a Base TI compatível com o análogo do implante e/ou análogo do intermediário; uso de outro diferente da compatibilidade pode ocasionar danos ao componente ou até mesmo ao implante, inviabilizando o uso destes.
- Antes de cada procedimento, verifique as condições dos instrumentais, respeitando sempre sua vida útil. Substitua os instrumentais em caso de danos, marcações apagadas, afiação comprometida, deformações ou desgaste.
- É de responsabilidade do profissional de prótese dental (TPD) utilizar os produtos Oralfix em conformidade com as instruções de uso.
- Os Componentes em Titânio (ASTM F136) para Provisório Oralfix (Ucla, Cilindro e Base TI) só deverão ser utilizados por profissionais devidamente habilitados e apenas para o fim a que se destinam. Para obter informações sobre capacitação ou utilização dos produtos, contactar a empresa.
- Antes de utilizar os produtos, o profissional deve estudar cuidadosamente as recomendações, advertências e precauções indicadas. Para uma utilização segura e eficaz, qualquer combinação ou uso conjunto com

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	17 de 18

outros produtos da Oralfix deve ser feita de acordo com as normas e instruções de uso recomendado (Manual de Instruções).

- A Oralfix não se responsabilizará por problemas gerados caso os produtos sejam utilizados de acordo com técnicas incorretas e/ou utilização combinada a produtos de terceiros, pois podem resultar no insucesso do procedimento, além de danos aos produtos. Instrumentais bem conservados para uso do componente temporário UCLA de Titânio, Cilindro de Titânio e Base TI significam apenas a condição essencial para um planejamento de sucesso.
- O planejamento incorreto pode comprometer o desempenho do componente e/ou resultando em falhas do sistema, como perda ou fraturas, afrouxamento ou fratura dos Parafusos Protéticos ou podendo afetar a finalidade do uso do componente.
- Recomenda-se que a prótese seja higienizada e esterilizada antes da instalação em boca.

EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos desde que o produto sendo utilizado conforme as suas instruções de uso e dentro da finalidade a que se destina o componente. É necessário respeitar os diâmetros e as indicações de tolerância dos componentes, conforme compatibilidade.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS E MANUTENÇÃO

Orientar o paciente quanto à necessidade de realizar um acompanhamento profissional após a cirurgia e obedecer às orientações sobre cuidados, higiene e prescrição de medicamentos. Estas orientações são de responsabilidade do profissional.

ARMAZENAMENTO

Deverão ser armazenados em local limpo e seco, longe da ação do sol (efeito da radiação solar), com temperatura inferior a 45°C.

TRANSPORTE: Devem ser transportados em ambiente limpo e seco, protegido da radiação solar direta, em temperatura máxima de 45°C.

DESCARTE DE MATERIAIS

Materiais após a utilização podem colocar em risco a saúde e o meio ambiente. Acondicionar e segregar em local adequado para fins de destinação final correta. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação da saúde e ambiental vigente.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminada : Indicado no rótulo.

SÍMBOLOS

A tabela descreve os símbolos que podem estar impressos na rotulagem do produto. Por favor, confira na rotulagem física quais os símbolos aplicáveis ao produto.

	Prazo de validade		Manter afastado da luz solar		lote		Número de referência
	Tamanho do produto		Consultar as instruções - Para utilização		Manter seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Produto de uso único		Data de fabricação		Fabricante		Temperatura máxima 40°C

	Titulo	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: UCLA TITÂNIO / CILINDRO TITÂNIO / BASE TI	TITÂNIO PARA PROVISÓRIO	Data:	12/2024
			Rev:	01
			Pág:	18 de 18

	Produto não estéril		Não levar a altas temperatura fundição				
---	------------------------	---	--	--	--	--	--

Fabricado e comercializado por:

FERREIRA INDUSTRIA ODONTOLOGICA LTDA.

Av. Angelina Ricci Vezozzo, nº 1245 – Indústria Leves, Londrina/PR – CEP: 86087-340.

CNPJ: 84.915.149/0001-90 – AFE nº 8.01.019-1.

Responsável Técnico: Keila Ferreira – CRA-PR: 20-25774.

www.oralfix.com.br - FONE: (43) 3321-1190 - Indústria Brasileira.

Notificação/MS: 80101919004 (Uso Laboratorial).