

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: TRANSFER COM PARAFUSO DO IMPLANTE HE / HI / CM / GM E DO INTERMEDIÁRIO MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	TRANSFER MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	Data:	08/2024
			Revisão:	01
			Página:	1 de 5

Este componente protético Oralfix destina-se a um procedimento especializado, o qual deve ser executado por profissionais habilitados em próteses, implantodontia e técnico em prótese dental. Para melhores resultados, utilize o produto com o conhecimento das técnicas adequadas e execute-as sempre em condições apropriadas, incluindo em ambiente cirúrgico adequado.

DESCRIÇÃO

O Transfer HE / HI / CM / GM do implante e do Intermediário juntamente com parafuso de fixação da Oralfix é um componente protético de uso e procedimentos protéticos especializados por profissionais da odontologia que já têm toda a informação científica e técnica necessária para o devido uso do produto, sendo moldeira aberta ou fechada, anti rotacional ou rotacional para assentamento conforme o implante e cilindro do intermediários, fabricado em aço inoxidável ASTM- F899-303.

Apresenta geometria com facetados e canais que favorecem a retenção para a transferência utilizando Moldeira Aberta ou Moldeira Fechada.

Interface Protética (Família)	Diâmetro (mm)	Altura de transmucoso (mm)
Transfer do Implante HE Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante HE Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante HI Moldeira Aberta Anti Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante HI Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante CM Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante CM Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante GM Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Implante GM Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	13,90
Transfer do Intermediário Mini Abutment Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Mini Abutment Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Abutment Cônico Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Abutment Cônico Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Pilar Abutment CM Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Pilar Abutment CM Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00



Título

MANUAL DE INSTRUÇÃO
PRODUTO:
TRANSFER COM PARAFUSO
DO IMPLANTE HE / HI / CM / GM E
DO INTERMEDIÁRIO
MOLDEIRA ABERTA E
MOLDEIRA FECHADA

Identificação

TRANSFER
MOLDEIRA
ABERTA E
MOLDEIRA
FECHADA

Informações

Data: 08/2024

Revisão: 01

Página: 2 de 5

Transfer do Intermediário Pilar Abutment GM Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Pilar Abutment GM Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Micro Abutment CM Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Micro Abutment CM Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Micro Abutment GM Moldeira Aberta Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Intermediário Micro Abutment GM Moldeira Aberta Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	9,00
Transfer do Implante HE Moldeira Fechada Anti-Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Implante HE Moldeira Fechada Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Implante HI Moldeira Fechada Anti Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Implante HI Moldeira Fechada Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Intermediário Mini Abutment Moldeira Fechada	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Intermediário Pilar Abutment Moldeira Fechada	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Intermediário Pilar Abutment CM Moldeira Fechada	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Intermediário Pilar Abutment CM Moldeira Fechada Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Intermediário Pilar Abutment GM Moldeira Fechada Rotacional	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50
Transfer do Intermediário Micro Abutment Pilar Moldeira Fechada	3,3 / 3,5 / 3,6 / 3,75 / 3,8 / 4,0 / 4,1 / 4,3 / 4,5 / 5,0 / 5,5	11,50

INDICAÇÃO DE USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

É indicado para fase de moldagem e transfrência replicando a posição do implante ou intermediário durante a obtenção do modelo de gesso, com o objetivo de confecção da prótese sobre o modelo de trabalho.

CONTRAINDICAÇÃO

Contraindica-se qualquer tipo de desgaste deste produto.


Não apresentam outras contraindicações desde que suas finalidades e indicações sejam seguidas corretamente.

MANUSEIO

Deverão ser esterilizados antes do uso nos procedimentos odontológicos. Encaixar o Transfer selecionado no

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: TRANSFER COM PARAFUSO DO IMPLANTE HE / HI / CM / GM E DO INTERMEDIÁRIO MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	TRANSFER MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	Data:	08/2024
			Revisão:	01
			Página:	3 de 5

implante ou intermediário de acordo com a compatibilidade e utilizando as técnicas de moldagem conforme o planejamento do profissional. Após a obtenção do modelo pelo profissional de odontologia, conforme técnicas adequadas, encaixar e parafusar o análogo no transfer correspondente. Para aperto do parafuso, utilize Chave Digital Sextavada ou Quadrada com aperto manual. Vaze o gesso sobre o molde, cobrindo todo o Análogo. Após a secagem do gesso, retire o transfer do molde de gesso.

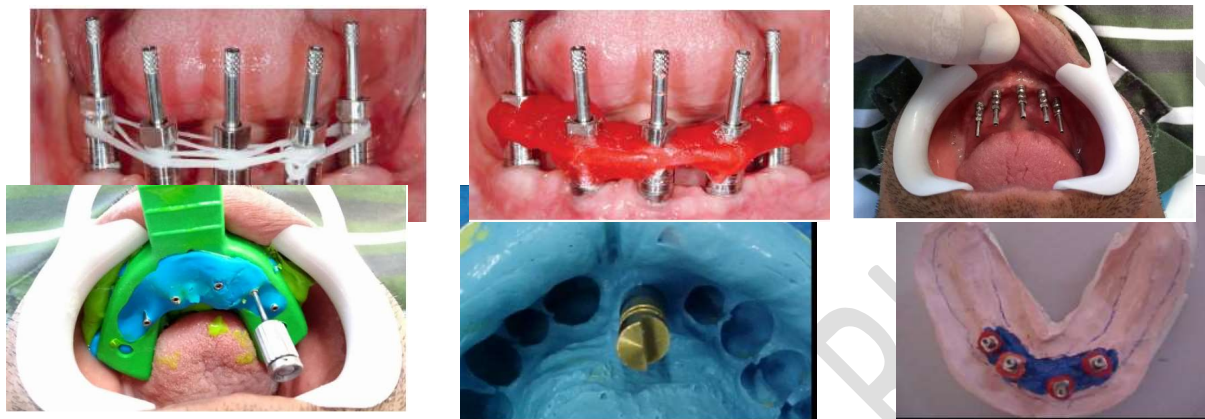

ESTERILIZAÇÃO:

São fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização. Esterilizar o produto na véspera ou no dia do procedimento. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave. Validade de Esterilização: 7 dias, desde que acondicionadas em ambiente limpo, seco e longe da ação do sol. Não utilizar o instrumental após o prazo de validade da esterilização. Limpe rigorosamente e periodicamente a autoclave.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

São acondicionados em embalagem saco laminado PET+PET METAL+PE/ PET+PE e identificação é realizada diretamente na embalagem sendo impresso descrição do produto, código, lote, validade, matéria-prima nome e endereço da empresa, RT sendo indelével e de fácil leitura. São vendidos unitariamente, não estéreis e são de uso reutilizáveis.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Certifique-se de que o Transfer seja compatível com o implante ou intermediário.
- Após a confecção da prótese, avalie sua adaptação sobre o Análogo.
- Este produto é reutilizável após retiradas de resíduo de gesso e ou resina.
- Antes de cada procedimento, certifique-se do perfeito encaixe entre as peças.
- Antes de cada procedimento verifique as condições dos instrumentais e/ou componentes da Oralfix, respeitando sempre sua vida útil. Substitua os instrumentais e/ou componentes em caso de dano, marcações apagadas, afiação comprometida, deformações e/ou desgaste.
- É de responsabilidade do dentista utilizar os produtos Oralfix em conformidade com as instruções de uso.
- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
- O planejamento incorreto pode comprometer o desempenho do componente e/ou do conjunto implante/prótese resultando em falhas do sistema, como perda ou fratura do Implante, afrouxamento ou fratura dos Parafusos Protéticos ou podendo afetar a finalidade do uso do componente.
- O reuso deste produto pode ocasionar: - efeitos biológicos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microorganismos e/ou substâncias decorrentes de usos anteriores e/ou do reprocessamento; - alterações das características físicas, mecânicas e químicas, macro e micro estruturais, originais do produto que podem prejudicar a sua funcionalidade pretendida. O reuso deste produto não garante sua segurança e

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: TRANSFER COM PARAFUSO DO IMPLANTE HE / HI / CM / GM E DO INTERMEDIÁRIO MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	TRANSFER MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	Data:	08/2024
			Revisão:	01
			Página:	4 de 5

eficácia.

EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos desde que o produto sendo utilizado conforme as suas instruções de uso e dentro da finalidade a que se destina o componente.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS E MANUTENÇÃO

Oriento o paciente quanto à necessidade de realizar um acompanhamento profissional após a cirurgia e obedecer às orientações sobre cuidados, higiene e prescrição de medicamentos. Estas orientações são de responsabilidade do profissional.

ARMAZENAMENTO

Deverão ser armazenados em local limpo e seco, longe da ação do sol (efeito da radiação solar), com temperatura inferior a 40°C.

TRANSPORTE

Os Transferentes de Moldagem (Transfers) devem ser transportados de modo adequado, em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol em temperatura máxima de 40°C. O transporte deve ser realizado em sua embalagem original. A embalagem protege contra quedas e colisões, porém para transporte à distância deve estar protegida por uma embalagem adicional.

DESCARTE DE MATERIAIS

Materiais após a utilização podem colocar em risco a saúde e o meio ambiente. Acondicionar e segregar em local adequado para fins de destinação final correta. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação da saúde e ambiental vigente.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado. Indicado no rótulo.

SÍMBOLOS

A tabela descreve os símbolos que podem estar impressos na rotulagem do produto. Por favor, confira na rotulagem física quais os símbolos aplicáveis ao produto.

	Prazo de validade		Manter afastado da luz solar		Código do lote		Número de referência
	Tamanho do produto		Consultar as instruções - Para utilização		Manter seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Produto de uso único		Data de fabricação		Fabricante		Temperatura máxima 40°C
	Produto não estéril						

Fabricado e comercializado por:

	Título	Identificação	Informações	
	MANUAL DE INSTRUÇÃO PRODUTO: TRANSFER COM PARAFUSO DO IMPLANTE HE / HI / CM / GM E DO INTERMEDIÁRIO MOLDERIA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	TRANSFER MOLDEIRA ABERTA E MOLDEIRA FECHADA	Data:	08/2024
			Revisão:	01
			Página:	5 de 5

FERREIRA INDUSTRIA ODONTOLOGICA LTDA.

Av. Angelina Ricci Vezozzo, nº 1245 – Indústria Leves, Londrina/PR – CEP: 86087-340.

CNPJ: 84.915.149/0001-90 – AFE nº 8.01.019-1.

Responsável Técnico: Keila Ferreira – CRA-PR: 20-25774.

www.oralfix.com.br - FONE: (43) 3321-1190 - Indústria Brasileira.

Registro ANVISA: 80101910001. Controlado pela Anvisa.

MANUAL DE INSTRUÇÃO